



## Bedienungsanleitung

### Kastrationszange für Lämmer

Artikel Nr. 24 77 34

#### Sicherheitshinweise und Benutzung

- Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten dürfen die Zange nicht benutzen, es sei denn, sie werden durch eine Betreuerin/einen Betreuer beaufsichtigt und unterwiesen.
- Halten Sie Die Kastrationszange von Kindern fern, sie ist kein Spielzeug.

#### Benutzung

Lämmer, die älter als 14 Tage alt sind, können mit der Zange kastriert werden.

1. Beginnen Sie vor der Kastration mit einer örtlichen Betäubung des Samenstranges und des Hodensacks. Bei Bedarf betäuben Sie auch das Tier.
  2. Nehmen Sie den Hodensack in die linke Hand, zum Körper hin gerichtet. Gleichzeitig tasten Sie den Samenstrang ab und fixieren ihn.
  3. Nehmen Sie die offene Zange in die rechte Hand und achten Sie darauf, dass Sie die Zange von der linken Hand weggerichtet auf den Samenstrang setzen.
  4. Quetschen Sie jeden Samenstrang zweimal im Abstand von 1 cm für eine Minute. Denken Sie daran, dass zwei Samenstränge vorhanden sind.
-

- 
5. Fixieren Sie dabei den Samenstrang so, dass er Ihnen beim Quetschen nicht entgleiten kann.
  6. Tasten Sie die gequetschten Stellen ab, um sicher zu gehen, dass der Samenstrang wirklich zerstoßen ist.

Bedenken Sie, dass diese Methode nicht 100 % sicher ist und halten Sie zur Sicherheit, die Männchen für 6 – 8 Wochen von den Weibchen getrennt.

Kastrieren Sie die Lämmer mit der Kastrationszange nur bis zum Alter von 2 Monaten.

### **Reinigung und Lagerung**

- Reinigen Sie die Kastrationszange nach jedem Gebrauch und vor jeder neuen Benutzung.
- Zur gründlichen Reinigung können Sie handelsübliche Desinfektionsmittel benutzen.
- Lagern Sie die Kastrationszange an einem trockenen und vor Staub und Schmutz geschützten Ort. Halten Sie die Zange außer Reichweite von Kindern.